

VOTRE DRAINAGE MINCEUR

DERMEO

Pressothérapie
PRESSOFAST




Dermeo[®]
Paris

LE PRINCIPE DE LA PRESSOTHÉRAPIE



La pressothérapie, un procédé de drainage et de remodelage, utilise un ensemble d'accessoires tels que les bottes, les manchons ou encore la ceinture, pour soulager la partie du corps ciblée.

Ces accessoires sont dotés de chambres qui se remplissent d'air à des cadences différentes, opérant une infinité de petites pressions sur la zone traitée. La pressothérapie permet de stimuler la circulation du sang. Elle est désormais utilisée pour remodeler la silhouette et pour son effet drainant sur la cellulite.


DRAINAGE LYMPHATIQUE PNEUMATIQUE : LA TECHNOLOGIE DU PRESSOFAST

Les bienfaits du drainage lymphatique ne sont plus à démontrer. PRESSOFAST prodigue des palpations mécaniques douces.

Prenons l'exemple des bottes, celles-ci sont compartimentées en chambres. La première chambre celle qui entoure le pied est gonflée par une pression induite par PRESSOFAST. Une fois la pression établie dans la deuxième

chambre, celle exercée dans la chambre initiale augmente progressivement. La différence de pression ainsi créée provoque le déplacement de la lymphe du compartiment haute pression vers le compartiment basse pression. De manière similaire, les chambres suivantes sont ainsi mises sous pression. Lors du soin, la modification de la pression dépend

du volume du membre traité. Par conséquent, PRESSOFAST assure une efficacité tout au long du soin, n'endommage pas les vaisseaux superficiels grâce à sa technique de palpations douces, et est l'accompagnement idéal au remodelage.

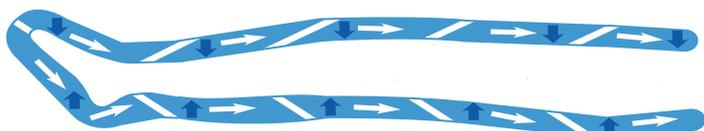

**CIRCULATION DE LA LYMPHE DU
PIED VERS LA DIRECTION VOULUE
GRÂCE À LA PRESSION PROGRESSIVE
EXERCÉE SUR LES CHAMBRES DE LA
BOTTE**


Dermeo[®]
Paris

www.dermeo.com
info@dermeo.com

189, rue d'Aubervilliers
75018 Paris - FRANCE

Tel + 33 (0) 1 72 98 98 72
Fax + 33 (0) 1 72 98 98 73

CARACTÉRISTIQUES DU PRESSOFAST

Le PRESSOFAST est un appareil de drainage lymphatique pneumatique à modulation de pression automatique, entièrement paramétrable. C'est l'appareil le plus simple à utiliser grâce à la facilité de ses réglages (temps de travail par chambre, temps de traitement, pression ...).

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions | L400mm x l310mm x H 110mm |
| Poids | 6,5 kg |
| Plage de pression | 20 - 200 mB (15-150 mmHg) |
| Puissance | 44 W |
| Intensité / Fréquence | 220 V/ 50 Hz |
| Intensité sonore | 49 dB < 52 dB |
| Confort d'utilisation | Grâce à sa conception avancée, le PRESSOFAST est très silencieux |

| | |
|--|---|
| Mode de régulation de la pression | Double Gradient de Pression Automatique |
| Durées ajustables | Temps de travail - Dégonflage - Repos et temps de traitement |
| Gonflage des éléments | 2 rangées de 5 sorties permettent le gonflage de 1 ou 2 éléments simultanément |
| Matériaux des éléments | Extérieur : Nylon Intérieur : Polyuréthane Fermeture : éléments thermo-soudés |

LES ACCESSOIRES



MANCHETTE GRAND MODÈLE À 5 COMPARTIMENTS 58 x 77 CM



SANGLE ABDOMINALE À 5 COMPARTIMENTS 56 x 37 CM



BOTTE À 5 COMPARTIMENTS 80 x 92 CM

APPLICATIONS DU PRESSOFAST

Les applications de PRESSOFAST sont nombreuses notamment pour soulager les jambes lourdes et réduire la cellulite*.

JAMBES LOURDES

La pressothérapie cible les jambes lourdes, en effet elle renforce le retour sanguin qui se matérialise par une réduction du gonflement et une diminution de la sensation de jambes lourdes. Un sentiment de bien-être et de confort est ressenti dès la première séance.

CELLULITE

L'appareil PRESSOFAST permet de réduire l'effet peau d'orange car il induit une diminution de la rétention d'eau. Pour pérenniser les résultats obtenus, les séances pourront être accompagnées d'un léger régime alimentaire.



Dermeo
Paris