

VOTRE BEAUTÉ

Mai 2007

**CET ÉTÉ
JE MONTRE
MES JAMBES**

**Marche à suivre
pour un galbe
parfait**

**MAKE UP
L'ESPRIT GEISHA
REINVENTÉ**

**10 autobronzants
à appliquer
les yeux fermés**

**SEINS ET
VENTRE LIFTÉS
SANS CICATRICE**

**PEAUX
REACTIVES
Ne les traitez
plus à la légère**

CADEAU
300 coffrets
Myokine
Fusio Nuit
de Vichy
valeur 36 €
voir page 30

**AVANT
APRES**

**CHANGER DE TÊTE
AVEC 2 COIFFEURS STARS**

**Coupes, couleurs, toutes les étapes
pour trouver son style**

M 06402 - 806 - F : 2,95 €



Oubliez ce geste

dépilation & réjuvenation

la maîtrise de la lumière pulsée

Tél. **0811 094 305** (prix d'un appel local) - **centres@dermeo.com**

merci d'adresser le coupon à :
DERMEO 189, rue d'Aubervilliers -75018 Paris

Pour connaître le centre
Dermeo le plus proche de chez vous

Nom :

Prénom :

Tél :

E-mail :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Visite beauté

DermeoTM
Soins Photocosmétiques
Paris

LA DÉPILATION en un flash ! par Dermeo™

• Comment cela fonctionne-t-il ?

La lumière pulsée est absorbée par la mélanine (pigment coloré) contenue dans les poils en phase de croissance (phase anagène), pour être acheminée jusqu'à la racine du poil. Cette lumière se transforme en chaleur, et c'est l'effet thermique qui détruit le poil et sa racine sans effet secondaire. C'est la "photothermolyse sélective" ou "photodépilation".



Aisselles avant traitement

Après 4 séances

• Pour qui et pour quelles parties du corps ?

La dépilation par la lumière pulsée peut être pratiquée sur toutes les peaux saines, claires ou foncées, pour les femmes comme pour les hommes, et sur toutes les parties du corps. Néanmoins, il est préférable d'éviter d'exposer au soleil les zones traitées, avant et après chaque séance. L'absence de mélanine dans le poil compromet le transfert de chaleur, ce qui explique l'absence de résultat sur les poils blancs et la nécessité d'un nombre de séances plus élevé pour les poils blonds.

• Pour quels résultats ?

Une non-repousse de plus de 80% a été constatée par les personnes traitées par la lumière pulsée. Des études cliniques conduites sur plusieurs années et dans plusieurs pays confirment un haut niveau d'efficacité.

• En combien de séances ?

Le nombre de séances est fonction de la nature et du type de poil, de la pigmentation de la peau, de l'âge et du sexe. En général 8 à 12 séances sont nécessaires à intervalles réguliers d'environ 6 semaines.

• A quel prix ?

Le prix à payer reste très raisonnable, car durable et donc amortissable dans le temps, ce qui n'est pas le cas des techniques traditionnelles (cire, rasoir, crème dépilatoire, pince, etc). Par ailleurs, la dépilation par lumière pulsée est bien moins onéreuse que les autres techniques permanentes.

Sous caution médicale



Dr F. RAHAL
Formateur et Consultant
en Lumière Pulsée

Informations : 0811 094 305

COMMUNIQUE