

Traitement conduit sur des patients volontaires effectué par Jean-Pierre TREMEL attaché de recherche clinique et le Docteur Julia VALDMAN
Treatment performed on voluntaries patients made by Jean-Pierre TREMEL an independent clinical research and the Doctor Julia VALDMAN



NOUVEAUX TRAITEMENTS DERMATOLOGIQUES SONO - COSMETIQUES
NEW DERMATOLOGIC AND SONO - COSMETIC TREATMENTS

Dermeo®

Paris

Date : 31 Mars 2011

Date : 31 March 2011



Avant/Before 10 minutes - 60 cm



Après/After 10 minutes - 58,5 cm

Femme de 32 ans 1,69 mètres pour 66 Kg
Type de traitement : **REMODELAGE**
Départ 2 minutes à **30** ou **1,5** watt/cm²
3 minutes à **60** ou **3** watt/cm²
5 minutes à **100** ou **5** watt/cm²
Total : **10 minutes**

Woman 32 years old tall : 1,69 meters for 66 Kg
Type of treatment : **REMODELAGE**
Start to 2 minutes at **30** or **1,5** watt/cm²
3 minutes to **60** or **3** watt/cm²
5 minutes to **100** or **5** watt/cm²
Total : **10 minutes**

Cavitationnal treatment

Traitement CAVITATIONNEL



Dermeo®

Paris

Date : 31 Mars 2011

Date : 31 March 2011



Avant/Before 10 minutes - 55 cm



Après/After 10 minutes - 53,2 cm

Femme de 38 ans 1,58 mètres pour 59 Kg
Type de traitement : **REMODELAGE**
Départ 2 minutes à **30** ou **1,5** watt/cm²
3 minutes à **60** ou **3** watt/cm²
5 minutes à **100** ou **5** watt/cm²
Total : **10 minutes**

Woman 38 years old tall : 1,58 meters for 59 Kg
Type of treatment : **REMODELAGE**
Start to 2 minuts at **30** or **1,5** watt/cm²
3 minuts to **60** or **3** watt/cm²
5 minuts to **100** or **5** watt/cm²
Total : **10 minuts**

Cavitationnal treatment

Traitement CAVITATIONNEL



Dermeo®


Paris

Date : 04 Avril 2011

Date : 04 April 2011



Avant/Before 10 minutes - 60 cm

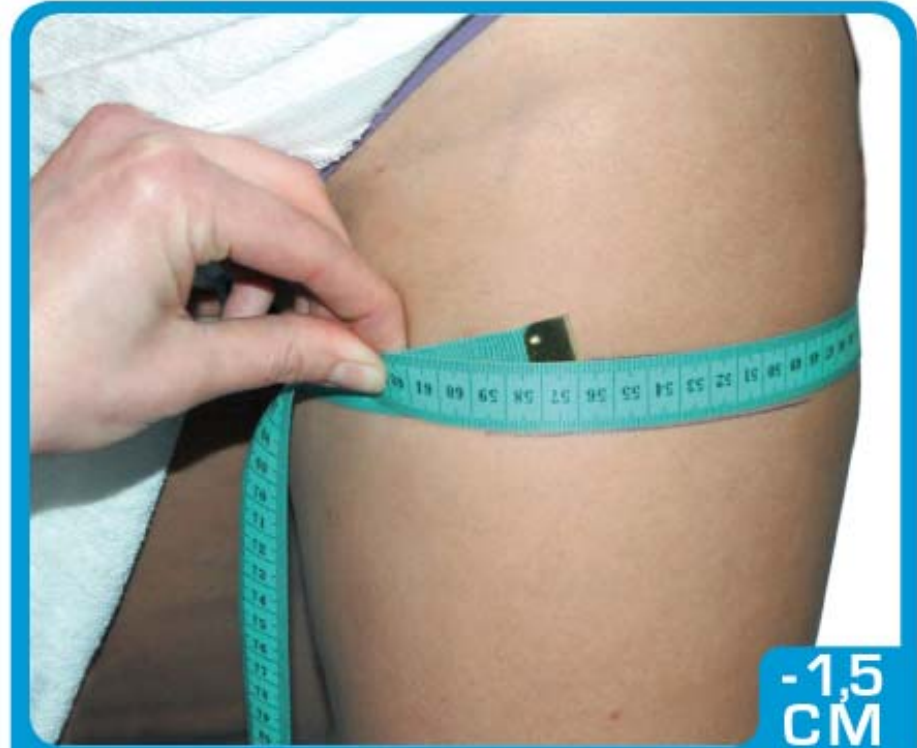

Après/After 10 minutes - 57,5 cm

Femme de 25 ans 1,58 mètres pour 54 Kg
Type de traitement : **REMODELAGE**
Départ 2 minutes à **30** ou **1,5** watt/cm²
3 minutes à **60** ou **3** watt/cm²
5 minutes à **100** ou **5** watt/cm²
Total : **10 minutes**

Woman 25 years old tall : 1,58 meters for 54 Kg
Type of treatment : **REMODELAGE**
Start to 2 minuts at **30** or **1,5** watt/cm²
3 minuts to **60** or **3** watt/cm²
5 minuts to **100** or **5** watt/cm²
Total : **10 minuts**

Cavitationnal treatment

Traitement CAVITATIONNEL



Dermeo®

Paris

Date : 11 Avril 2011

Date : 11 April 2011



Avant/Before 10 minutes - 94 cm



Après/After 10 minutes - 93 cm

Femme de 32 ans 1,69 mètres pour 66 Kg
Type de traitement : **REMODELAGE**
Départ 2 minutes à **30** ou **1,5** watt/cm²
3 minutes à **60** ou **3** watt/cm²
5 minutes à **100** ou **5** watt/cm²
Total : **10 minutes**

Woman 32 years old tall : 1,69 meters for 66 Kg
Type of treatment : **REMODELAGE**
Start to 2 minutes at **30** or **1,5** watt/cm²
3 minutes to **60** or **3** watt/cm²
5 minutes to **100** or **5** watt/cm²
Total : **10 minutes**

Cavitationnal treatment

Traitement CAVITATIONNEL



Dermeo®

Paris

Date : 07 Avril 2011

Date : 07 April 2011



Avant/Before 10 Minutes - 56,5 cm



Après/After 10 Minuts - 55 cm

Femme de 23 ans 1,60 mètres pour 57 Kg
Type de traitement : **REMODELAGE**
Départ 2 minutes à **30** ou **1,5** watt/cm²
3 minutes à **60** ou **3** watt/cm²
5 minutes à **100** ou **5** watt/cm²
Total : **10 Minutes**

Woman 23 years old tall : 1,60 meters for 57 Kg
Type of treatment : **REMODELAGE**
Start to 2 minuts at **30** or **1,5** watt/cm²
3 minuts to **60** or **3** watt/cm²
5 minuts to **100** or **5** watt/cm²
Total : **10 Minuts**

Cavitationnal treatment

Traitement CAVITATIONNEL



Dermeo®

Paris

Date : 07 Avril 2011

Date : 07 April 2011



Avant/Before 10 Minutes - 58 cm



Après/After 10 Minuts - 57,5 cm

Femme de 23 ans 1,60 mètres pour 57 Kg
Type de traitement : **REMODELAGE**
Départ 2 minutes à **30** ou **1,5** watt/cm²
3 minutes à **60** ou **3** watt/cm²
5 minutes à **100** ou **5** watt/cm²
Total : **10 minutes**

Woman 23 years old tall : 1,60 meters for 57 Kg
Type of treatment : **REMODELAGE**
Start to 2 minuts at **30** or **1,5** watt/cm²
3 minuts to **60** or **3** watt/cm²
5 minuts to **100** or **5** watt/cm²
Total : **10 minuts**

Cavitationnal treatment

Traitement CAVITATIONNEL



Dermeo®

Paris

Date : 24 Janvier 2011

Date : 24 January 2011



Avant/Before 10 minutes - 94 cm



Après/After 10 minutes - 90 cm

Homme de 67 ans 1,80 mètres pour 73 Kg
Type de traitement : **REMODELAGE**
Départ 2 Minutes à **30** ou **1,5** watt/cm²
3 Minutes à **60** ou **3** watt/cm²
5 Minutes à **100** ou **5** watt/cm²
Total : **10 Minutes**

Man 67 years old 1,80 meters for 73 Kg
Type of treatment : **REMODELAGE**
Start 2 Minutes to **30** or **1,5** watt/cm²
3 Minutes to **60** or **3** watt/cm²
5 Minutes to **100** or **5** watt/cm²
Total : **10 Minutes**

Cavitationnal treatment

Traitement
CAVITATIONNEL



Dermeo®

Paris

Date : 19 Janvier 2011

Date : 19 January 2011



Avant/Before 10 minutes - 97,5 cm



Après/After 10 minutes - 94 cm

Homme de 42 ans 1,72 mètres pour 76 Kg
Type de traitement : **REMODELAGE**
Départ 2 Minutes à 30 ou 1,5 watt/cm²
3 Minutes à 60 ou 3 watt/cm²
5 Minutes à 100 ou 5 watt/cm²
Total : 10 Minutes

Man 42 years old tall : 1,72 mètres for 76 Kg
Type of treatment : **REMODELAGE**
Start to 2 Minutes at 30 or 1,5 watt/cm²
3 Minutes to 60 or 3 watt/cm²
5 Minutes to 100 or 5 watt/cm²
Total : 10 Minutes

Cavitationnal treatment

Traitement
CAVITATIONNEL

Dermeo®

Paris

Date : 24 Janvier 2011

Date : 24 January 2011



Avant/Before 10 minutes - 112 cm



Après/After 10 minutes - 109 cm

Femme de 35 ans 1,62 mètres pour 78 Kg
Type de traitement : **REMODELAGE**
Départ 2 Minutes à **30** ou **1,5** watt/cm²
3 Minutes à **60** ou **3** watt/cm²
5 Minutes à **100** ou **5** watt/cm²
Total : **10 Minutes**

Woman 35 years old 1,62 mètres for 78 Kg
Type of treatment : **REMODELAGE**
start 2 Minutes to **30** or **1,5** watt/cm²
3 Minutes to **60** or **3** watt/cm²
5 Minutes to **100** or **5** watt/cm²
Total : **10 Minutes**

Cavitationnal treatment

Traitement CAVITATIONNEL