

## B - Traitements dépilatoires

Dépilation visage et corps chez 6 sujets

### Sujet N°1 :

Dépilation au niveau des aisselles.

Femme de 40 ans.

Réglage du type de peau : « Moyenne ».

Train de pulse : 6 pulses de 4 ms dont le premier de 3 ms avec un intervalle de 25 ms.

Filtre HR/620-1200 de grande surface.

**J0 :**

Nombre de poils : 25 / cm<sup>2</sup>.

Fluence : 15 J/ cm<sup>2</sup>,

Type de poils : « Épais »,

Tolérance excellente.

**À 6 semaines :**

La repousse a été plus lente que d'habitude.

Nombre de poils : 6/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 15 J/ cm<sup>2</sup>,

Type de poils : « Épais »,

Tolérance excellente.

**À 12 semaines :**

Repousse toujours très lente.

Nombre de poils : 8/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 15 J/ cm<sup>2</sup>,

Type de poils : « Moyen »,

Tolérance excellente.

**À 16 semaines - Constat :**

Résultat et tolérance excellente, on ne compte plus que 6 poils/cm<sup>2</sup>. Une diminution de 78% de la pilosité sur la zone traitée est constatée après seulement 2 séances.

La patiente a une impression de repousse plus lente avec des poils plus fins.

Satisfaction totale pour le sujet.

Note médecin : 8/10

Note sujet : 8/10



Avant

Après 3 séances

**Sujet N°2 :**

Femme de 45 ans, incluse pour une dépilation des aisselles.

Réglage du type de peau : « Claire ».

Train de pulse : 6 pulses de 4 ms dont le premier de 3 ms avec un intervalle de 20 ms.

Filtre HR/620-1200 de grande surface.

**J0 :**

Nombre de poils : 28/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 15 J/ cm<sup>2</sup>,

Type de poils : « Épais »,

Tolérance excellente.

**À 6 semaines :**

La repousse a été plus lente que d'habitude.

Nombre de poils : 9/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 15 J/ cm<sup>2</sup>,

Type de poils : « Épais »,

Tolérance excellente.

**À 12 semaines :**

Repousse toujours très lente.

Nombre de poils : 7/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 15 J/ cm<sup>2</sup>,

Type de poils : « Moyen »,

Tolérance excellente .

**À 16 semaines - Constat :**

Nous avons obtenu d'excellents résultats : on ne compte plus que 4 poils/cm<sup>2</sup>, soit une diminution de plus de 85% de la pilosité à 12 semaines et après seulement 2 séances.

La repousse est visiblement plus lente avec des poils plus fins.

De plus la tolérance est tout à fait satisfaisante.

Note médecin : 8/10

Note sujet : 8/10



Avant

Après 3 séances

**Sujet N°3 :**

Femme de 48 ans.

Dépilation du maillot.

Réglage du type de peau : « Claire »,

Type de poils : « Épais »,

Train de pulse : 6 pulses de 4 ms dont le premier de 3 ms avec un intervalle de 20 ms.

Filtre HR/620-1200 de grande surface

**J0 :**

Nombre de poils : 8/cm<sup>2</sup>

Fluence : 15 J/ cm<sup>2</sup>.

Un prurit sans inflammation a été observé durant les deux jours qui ont suivi la séance.

**À 6 semaines :**

La repousse a été plus lente que d'habitude,

Nombre de poils : 4/cm<sup>2</sup>,

Fluence : 18 J/ cm<sup>2</sup>.

Lors de cette séance, une panne de machine est survenue. La séance a du être interrompue. Seul le côté gauche du maillot a été traité.

Bonne tolérance.

**À 12 semaines :**

Repousse toujours très lente.

Nombre de poils : 4/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 15 J/ cm<sup>2</sup>.

Tolérance excellente.

**À 16 semaines - Constat :**

Nous avons obtenu d'excellents résultats : on ne compte plus que 3 poils/cm<sup>2</sup>.

La repousse est visiblement plus lente avec des poils plus fins.

De plus la tolérance a été excellente.

La patiente a été totalement comblée.

Note médecin : 8/10

Note sujet : 10/10



Avant



Après 3 séances

**Sujet N°7 :**

Femme de 36 ans,

Dépilation des jambes,

Réglage du type de peau : « Blanche »,

Type de poils : « Moyen »,

Train de pulse : 6 pulses de 4 ms dont le premier de 3 ms avec un intervalle de 20 ms.

Filtre HR/620-1200 de grande surface.

**J0 :**

Nombre de poils : 13/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 20 J/ cm<sup>2</sup>.

Tolérance excellente.

**À 6 semaines :**

Nombre de poils : 6/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 20 J/ cm<sup>2</sup>.

Bonne tolérance.

**À 12 semaines :**

Nombre de poils : 6/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 20 J/ cm<sup>2</sup>.

Tolérance excellente.

**À 16 semaines - Constat :**

Nous avons obtenu d'excellents résultats : on ne compte plus que 4 poils/cm<sup>2</sup>, ce qui représente une amélioration de la pilosité du sujet de plus de 75% après les 3 séances.

Les poils ont repoussé de plus en plus fin au fil de séances.

La patiente a une impression, de peau plus souple.

De plus la tolérance a été excellente.

Note médecin : 8/10

Note sujet : 8/10



Avant



Après 3 séances

**Sujet N°21 :**

Femme de 38 ans,

Dépilation des contours du visage.,

Réglage du type de peau : « Brune »,

Type de poils : « Fins »,

Train de pulse : 6 pulses de 4 ms dont le premier de 3 ms avec un intervalle de 20 ms,

Filtre HR/620-1200 de grande surface.

**J0 :**

Nombre de poils : 17/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 13 puis 15 J/ cm<sup>2</sup>.

Un léger érythème est apparu après la séance ainsi que des boutons.

Ils ont perduré 3 jours.

**À 3 semaines :**

La repousse a été très lente, nombre de poils : 2/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 15 J/ cm<sup>2</sup>.

Bonne tolérance.

**À 6 semaines :**

Nombre de poils : 3/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 15 J/ cm<sup>2</sup>.

Tolérance excellente.

#### À 9 semaines - Constat :

Nombre de poils : 3/cm<sup>2</sup>.

Bonne tolérance.

82% des poils n'ont pas repoussé à 9 semaines de la première séance après 3 soins.

Les résultats obtenus sont très satisfaisants. Le nombre de poils sur la zone traitée a diminué et la repousse est plus lente.

Note médecin : 8/10

Note sujet : 8/10



Avant



Après 4 séances



Avant



Après 4 séances

#### Sujet N°22 :

Homme âgé de 21 ans a été inclus pour une dépilation du bras droit,

Réglage du type de peau : « Claire »,

Type de poil : « Moyen »,

Train de pulse : 6 pulses de 4 ms dont le premier de 3 ms avec un intervalle de 20 ms,

Filtre HR/620-1200 de grande surface.

J0 :

Nombre de poils : 6/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 18 J/ cm<sup>2</sup> pour la partie intérieure, 20 J/c m2 pour la

partie extérieure.

Le patient a eu une sensation de prurit pendant 2 à 3 jours.

#### À 6 semaines :

Nombre de poils : 3/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 18 J/ cm<sup>2</sup> pour la partie intérieure, 20 J/cm<sup>2</sup> pour la partie extérieure.

Tolérance excellente.

#### À 12 semaines :

Nombre de poils : 3/cm<sup>2</sup>.

Fluence : 18 J/ cm<sup>2</sup> pour la partie intérieure, 20 J/cm<sup>2</sup> pour la partie extérieure.

Tolérance excellente.

#### À 16 semaines - Constat :

Nombre de poils : 2/cm<sup>2</sup>.

Le résultat obtenu est très satisfaisant.

La dépilation de la zone traitée va permettre au patient de faire réaliser un tatouage sur son bras.

Note médecin : 8/10

Note sujet : 8/10



Avant



Après 4 séances



Avant



Après 4 séances