

2) Soin de réjuvenation en stimulation cellulaire pour 3 sujets

Filtre SR/535-1200 de grande taille.

Les traitements ont été effectués sur le visage des patientes.

Sujet N° 4 :

Femme âgée de 48 ans,

Réglage du type de peau : « Claire »,

Réglage du type de soin : « Tonique »,

Train de pulse : 5 pulses de 3 ms avec un intervalle de 20 ms.

J0 :

Score 3 pour la tonicité de la peau du visage,

Score 0,5 pour l'éclat du teint,

Score 1 pour la dilatation des pores cutanés,

Score 3 pour la profondeur des rides et volume mesurée par la SkinStation de 90 mm³,

Score 1 pour les cernes.

Fluence : 14 sur le visage et 11 J/cm² sur le front.

Tolérance excellente.

À 2 semaines :

Score 0 pour la tonicité de la peau du visage,

Score 0 pour la dilatation des pores cutanés,

Score 2 pour la profondeur des rides,

Constat :

Légère augmentation de l'éclat du teint,

Pas de modulation des cernes.

Fluence : 15 sur le visage et 12 J/cm² sur le front.

Présence d'un érythème localisé aux régions mandibulaires

Sensation de brûlure sur la région péri-auriculaire gauche pendant 24 heures après le traitement.

À 4 semaines :

Score 1,5 pour la tonicité de la peau du visage,

Score 0 pour la dilatation des pores cutanés,

Score 1,5 pour la profondeur des rides,

Constat :

Éclat du teint en augmentation,

Pas de modulation des cernes.

Fluence : 15 sur le visage et 12 J/cm² sur le front.

Présence d'un érythème plus important qu'à la deuxième séance.

À 6 semaines :

Score 1 pour la tonicité de la peau du visage,

Score 0 pour la dilatation des pores cutanés,

Score 1,5 pour la profondeur des rides et volume mesurée par la SkinStation de 70 mm³.

Constat :

Légère augmentation de l'éclat du teint.

Pas de modulation des cernes.
Bonne Tolérance.
Efficacité importante sur l'éclat du teint et la profondeur des rides.

Note médecin : 7/10


Note sujet : 7/10



Avant



Après 3 séances

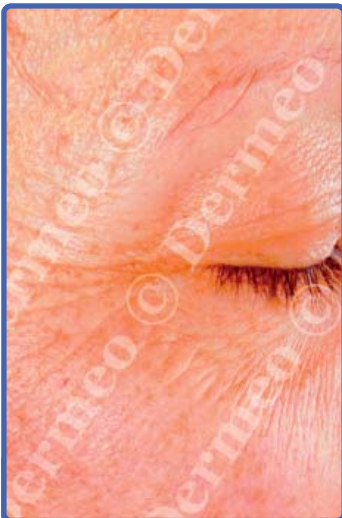

Avant



Après 3 séances

Sujet N° 5

Femme âgée de 45 ans.
Réglage du type de peau : « Claire »,
Réglage du type de soin : « Tonique »,
Train de pulse : 5 pulses de 3 ms avec un intervalle de 20 ms.

J0 :

Score 1,5 pour la tonicité de la peau du visage,
Score 0,5 pour l'éclat du teint,
Score 1 pour la dilatation des pores cutanés,
Score 1,5 pour la profondeur des rides et volume mesurée par la SkinStation de 65 mm³.

Score 0 pour les cernes.

Fluence : 12 sur le visage et 10 J/cm² sur le front.
Tolérance excellente.

À 2 semaines :

Score 0 pour la tonicité de la peau du visage,
Score 1 pour la dilatation des pores cutanés,
Score 1 pour la profondeur des rides,
Constat :
Légère augmentation de l'éclat du teint.
Pas de modulation des cernes.

Fluence : 14 sur le visage et 11 J/cm² sur le front.
Bonne tolérance

À 4 semaines :

Score 0 pour la tonicité de la peau du visage,
Score 1 pour la dilatation des pores cutanés,
Score 0,5 pour la profondeur des rides.

Constat :

Éclat du teint stabilisé.
Pas de modulation des cernes.

Fluence : 12 J/cm² sur le front et le reste du visage.
La patiente a noté une hypersensibilité de la peau du visage pendant 2-3 jours après la séance.

À 6 semaines :

Score 0 pour la tonicité de la peau du visage,
Score 1 pour la dilatation des pores cutanés,
Score 0,5 pour la profondeur des rides et volume mesurée par la SkinStation de 50 mm³.

Constat :

Éclat du teint stabilisé,
Pas de modulation des cernes,
Tolérance excellente.
L'efficacité très bonne a concerné, la tonicité et l'éclat du teint.

Note médecin : 8/10

Note sujet : 8/10



Fluence : 15 J/cm² sur le visage et 12 sur le front et la lèvre supérieure.
Bonne tolérance.

À 6 semaines :

Score 0 pour la tonicité de la peau du visage.
Score 1 pour la dilatation des pores cutanés.
Score 2 pour la profondeur des rides et volume mesurée par la SkinStation de 72 mm³.

Constat :

Augmentation importante de l'éclat du teint,
Pas de modulation des cernes,
Tolérance excellente.
L'efficacité très bonne a concerné, la tonicité, l'éclat du teint et de façon modérée sur les ridules de la patte d'oie.

Note médecin : 7/10

Note sujet : 6,5/10

Sujet N° 6

Femme âgée de 54 ans.
Réglage du type de peau : « Moyenne »,
Réglage du type de soin : « Tonique »,
Train de pulse : 5 pulses de 3 ms avec un intervalle de 25 ms.

J0 :

Score 2 pour la tonicité de la peau du visage,
Score 0,5 pour l'éclat du teint,
Score 2 pour la dilatation des pores cutanés,
Score 3 pour la profondeur des rides et volume mesurée par la SkinStation de 80 mm³.
Score 1 pour les cernes.

Fluence : 14 sur le visage et 11 J/cm² sur le front.
Tolérance excellente.

À 2 semaines :

Score 1 pour la tonicité de la peau du visage,
Score 1 pour la dilatation des pores cutanés,
Score 2 pour la profondeur des rides.

Constat :

Légère augmentation de l'éclat du teint.
Pas de modulation des cernes.

Fluence : 15 sur le visage et 12 J/cm² sur le front et la lèvre supérieure.
Bonne tolérance.

À 4 semaines :

Score 1 pour la tonicité de la peau du visage,
Score 1 pour la dilatation des pores cutanés,
Score 2 pour la profondeur des rides.

Constat :

Légère augmentation de l'éclat du teint.
Pas de modulation des cernes.

